

Um novo padrão. Uma nova opção.

Máscara de mínimo contato em gel Philips Respironics Nuance Pro

Guia de ajuste da máscara



1

Antes de colocar a máscara, coloque as hastas almofadadas de mínimo contato sob as narinas. Escolha o tamanho de almofadado que se ajuste confortavelmente sob o nariz sem nenhuma folga.

Importante: Não introduza a base de gel das almofadas nas narinas.



2

Ao colocar o fixador de cabeça, segure suavemente a almofada de mínimo contato sob o nariz. O fixador de cabeça deve estar totalmente encostado na parte de trás da cabeça.



3

Introduza as hastas almofadadas de mínimo contato nas narinas de modo que elas se ajustem confortavelmente sob o nariz sem nenhuma folga.



4

Ajuste a faixa superior da cabeça de modo que o fixador de cabeça se ajuste logo acima das orelhas e não fique próximo demais dos olhos. O fixador de cabeça deve ficar folgado e confortável.



5

Ajuste as faixas laterais uniformemente puxando-as para cima, as almofadas de gel devem se ajustar sob os ossos da bochecha. A máscara deve dar uma sensação segura e confortável quando colocada no rosto. Não aperte demais.



6

Os ajustes finais de conforto e vedação devem ser feitos na posição deitada com a pressão do dispositivo aplicada.

Observação: se vazamentos excessivos persistirem, experimente outro tamanho de almofadado.

Detalhes adicionais de colocação podem ser encontrados nas instruções que acompanham sua máscara.

Para mais informações, visite www.philips.com/respironics

MM 2/20/14 MCI 4106011

PHILIPS
RESPIRONICS

Um novo padrão. Uma nova opção.

Máscaras de gel de mínimo contato Philips Respironics Nuance

Guia de ajuste da máscara



1

Antes de colocar a máscara, coloque as hastas almofadadas de mínimo contato sob as narinas. Escolha o tamanho de almofadado que se ajuste confortavelmente sob o nariz sem nenhuma folga.

Importante: Não introduza a base de gel das almofadas nas narinas.



2

Ao colocar o fixador de cabeça, segure suavemente a almofada de contato mínimo sob o nariz. O fixador de cabeça deve estar totalmente encostado na parte de trás da cabeça.



3

Introduza as hastas almofadadas de mínimo contato nas narinas de modo que elas se ajustem confortavelmente sob o nariz sem nenhuma folga.



4

Ajuste a faixa superior da cabeça de modo que o fixador de cabeça se ajuste logo acima das orelhas e não fique próximo demais dos olhos. O fixador de cabeça deve ficar folgado e confortável.



5

Ajuste as faixas laterais uniformemente puxando-as para baixo; a máscara deve proporcionar uma sensação segura e confortável quando colocada no rosto. Não aperte demais.



6

Os ajustes finais de conforto e vedação devem ser feitos enquanto na posição deitada com a pressão do dispositivo aplicada.

Observação: se vazamentos excessivos persistirem, experimente outro tamanho de almofadado.

Detalhes adicionais de colocação podem ser encontrados nas instruções que acompanham sua máscara. Uma estrutura menor de tecido também está disponível mediante solicitação.

Para mais informações, visite www.philips.com/respironics

MM 2/20/14 MCI 4106011

PHILIPS
RESPIRONICS