

Swift™ LT

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

Guia de Colocação e Ajuste



1

- Segure as almofadas sobre o nariz e puxe o arnês sobre a cabeça.
- O arnês deve ficar a meio caminho entre as orelhas e os olhos.



2

- Ajuste as correias superiores puxando-as uniformemente até ficarem confortáveis.
- Não aperte em demasia.



3

- Repita a etapa 2 com as correias traseiras.
- Não aperte em demasia.



4

- Usando o tambor giratório, posicione as almofadas nasais no ângulo mais adequado.
- Conecte o tubo curto do Swift LT ao tubo de ar do dispositivo.
- Ligue o dispositivo.



5

- O Swift LT já está ajustado e pronto para uso.



Opcional

- Para modificar a posição do tubo, use o retentor do tubo.



- Para prender, pressione-o para dentro da fivela superior do arnês.
- Prenda o tubo curto ou o tubo de ar do dispositivo, dependendo da flexibilidade necessária.
- O tubo pode ser posicionado de ambos os lados do rosto ou no centro.
- Se as almofadas pressionarem seu nariz, ajuste o tubo no retentor.

 Para obter detalhes, consulte o *Manual do Usuário do Sistema de Almofadas Nasais Swift LT*.