

Mirage™ SoftGel

MASCARILLA NASAL

Guía de colocación



1

- Coloque el disco MicroFit en la posición 24, de modo que el apoyo para la frente quede completamente extendido.



2

- Desconecte el broche inferior del arnés, sostenga la mascarilla por encima de la nariz y póngase el arnés tirando de él por encima de la cabeza.



3

- Vuelva a conectar el broche inferior del arnés, asegurándose de que encaje en su lugar.



4

- Ajuste las correas superiores de modo parejo. No las deje demasiado tirantes.



5

- Ajuste las correas inferiores hasta dejarlas en una posición que resulte cómoda.



6

- Conecte un extremo del tubo de aire a la pieza giratoria y el otro extremo al equipo.
- Encienda el equipo.



CONSEJO

- Ajuste el disco para corregir las fugas que ocurran en la nariz.



CONSEJO

- Ajuste las correas inferiores para corregir las fugas que ocurran en el labio superior.

Mirage™ SoftGel

MASCARILLA NASAL

Comodidad de la serie ConvertAble™

La mascarilla nasal Mirage™ SoftGel ofrece una comodidad excepcional con la calidad y el desempeño reconocidos de ResMed. Fácil y rápida de colocar, la Mirage SoftGel es parte de la exclusiva serie ConvertAble™ de ResMed, que brinda la posibilidad de elegir entre dos almohadillas, en un mismo

armazón duradero. La Mirage SoftGel ofrece una sensación suave sobre el rostro y un excelente sostén, con lo que añade la comodidad, durabilidad y libertad de elección que sólo una mascarilla ConvertAble puede ofrecer.

Disco MicroFit

Permite optar entre 24 posiciones, para obtener un mejor ajuste, sellado y comodidad.

El armazón ConvertAble de ResMed

Se puede utilizar con las almohadillas Mirage SoftGel y Mirage Activa™ LT, con lo cual brinda eficiencia para la empresa, ahorros en los costos y flexibilidad.

Codo que gira 360°

Permite colocar el tubo en diversas posiciones para obtener la máxima comodidad.


Ventilación silenciosa y difusa

Dispersa el aire con suavidad y en silencio, alejándolo de la pareja.



Codo con división

Contribuye a la eliminación del CO2 y reduce el nivel de ruido.

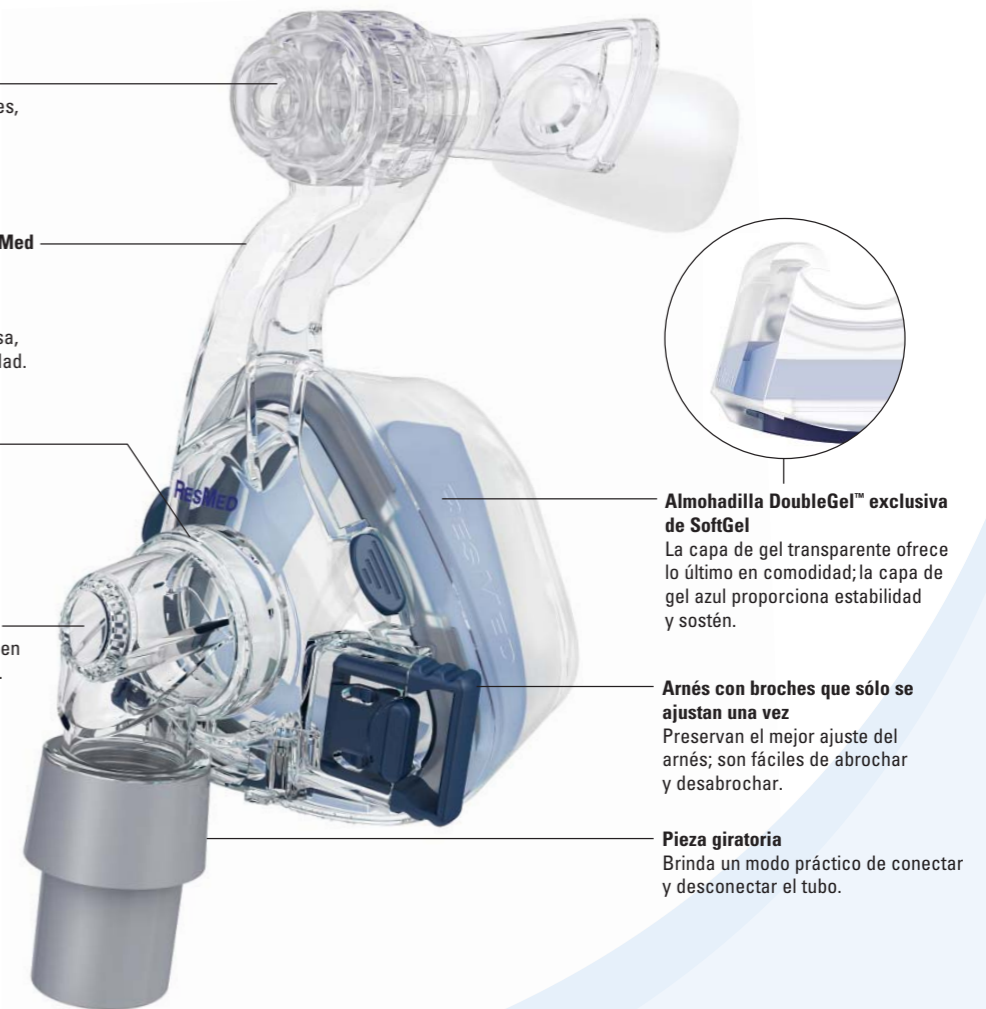

Almohadilla DoubleGel™ exclusiva de SoftGel

La capa de gel transparente ofrece lo último en comodidad; la capa de gel azul proporciona estabilidad y sostén.

Arnés con broches que sólo se ajustan una vez

Preservan el mejor ajuste del arnés; son fáciles de abrochar y desabrochar.

Pieza giratoria

Brinda un modo práctico de conectar y desconectar el tubo.



ASPECTOS TECNOLÓGICOS DESTACADOS

Almohadilla DoubleGel exclusiva de SoftGel

La almohadilla DoubleGel de la Mirage SoftGel ofrece una sensación suave sobre el rostro y un excelente sostén.

- **Comodidad:** La capa de gel transparente se adapta de forma automática a la nariz y a los rasgos únicos de cada persona, con lo que crea un ajuste suave y delicado.
- **Sostén:** La capa de gel azul añade estabilidad y sostén, preservando su forma y estructura.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Suavidad y comodidad sin igual

- La capa externa de la almohadilla DoubleGel brinda una suavidad inigualable. La capa de gel azul preserva la estabilidad y el sostén.
- Colocarla es una tarea sencilla, tanto para los usuarios que ya tienen experiencia como para los pacientes que utilizan una mascarilla por primera vez.

Tratamiento ultrasilencioso

- Una serie especial de orificios de ventilación pequeños e integrados dispersa el aire en silencio. Esto permite al paciente y a su pareja dormir bien durante la noche.

Más fácil de colocar correctamente

- La almohadilla de pared doble Mirage combinada con el diseño de la almohadilla DoubleGel hacen de la colocación un proceso sencillo.
- La almohadilla se adapta a los contornos individuales del rostro y permite obtener un ajuste cómodo con facilidad.

Una mascarilla ConvertAble representa libertad de elección

- Las mascarillas ConvertAble de ResMed brindan la posibilidad de elegir entre dos almohadillas en un mismo armazón.
- La libertad de elección ayuda a los pacientes a aceptar el tratamiento en las primeras etapas y a mantener su compromiso con éste.

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

ConvertAble significa eficiencia en materia de inventario

- La SoftGel es una mascarilla reutilizable que se puede emplear en distintos pacientes, adecuada para usar repetidamente en el laboratorio.
- Las piezas comunes e intercambiables promueven un inventario eficiente y ahorros en los costos.
- Menor tiempo de colocación y capacitación.
- La Mirage SoftGel es muy duradera, lo que garantiza un desempeño constante y una menor cantidad de retornos a la consulta.

Satisfacción del cliente y mayor cumplimiento

- La posibilidad de ajustar la mascarilla desde el primer uso y de obtener comodidad permanente aumentan la aceptación del tratamiento.
- Las almohadillas intercambiables mejoran el cumplimiento del paciente y evitan el alto costo que implica cambiar de mascarilla.
- La posibilidad de elegir para obtener ajuste y comodidad garantiza la satisfacción del paciente y reduce la cantidad de veces que éste regresa a la consulta.
- El paquete integral de apoyo para el usuario incluye un bolso para viaje y el manual del usuario con instrucciones para cuidar y colocar la mascarilla.

PREFERIDA POR LOS PACIENTES

- 8 de cada 10 pacientes consideran que el nivel de comodidad y durabilidad proporcionado por la SoftGel es mejor que el que brindan otras mascarillas de gel¹
- 3 de cada 4 pacientes opinan que duermen mejor con la SoftGel¹



CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Mascarilla nasal Mirage SoftGel

Mediana	61601
Grande	61602

CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Códigos de reembolso

Mascarilla nasal utilizada con un equipo de presión positiva en las vías respiratorias, 1 cada 3 meses	A7034
Almohadilla de reemplazo para mascarilla nasal, 2 por mes	A7032
Arnés utilizado con un equipo de presión positiva en las vías respiratorias, 1 cada 6 meses	A7035

Mirage™ SoftGel

MASCARILLA NASAL

Tarjeta de componentes

Sistema completo

M 61601 G 61602

Sistema de armazón*

(sin arnés)

61627 (M)

61628 (G)

Conjunto del armazón*


(sin arnés ni almohadilla)

60175 (Es)

Conjunto del codo

(codo y pieza giratoria)

16399

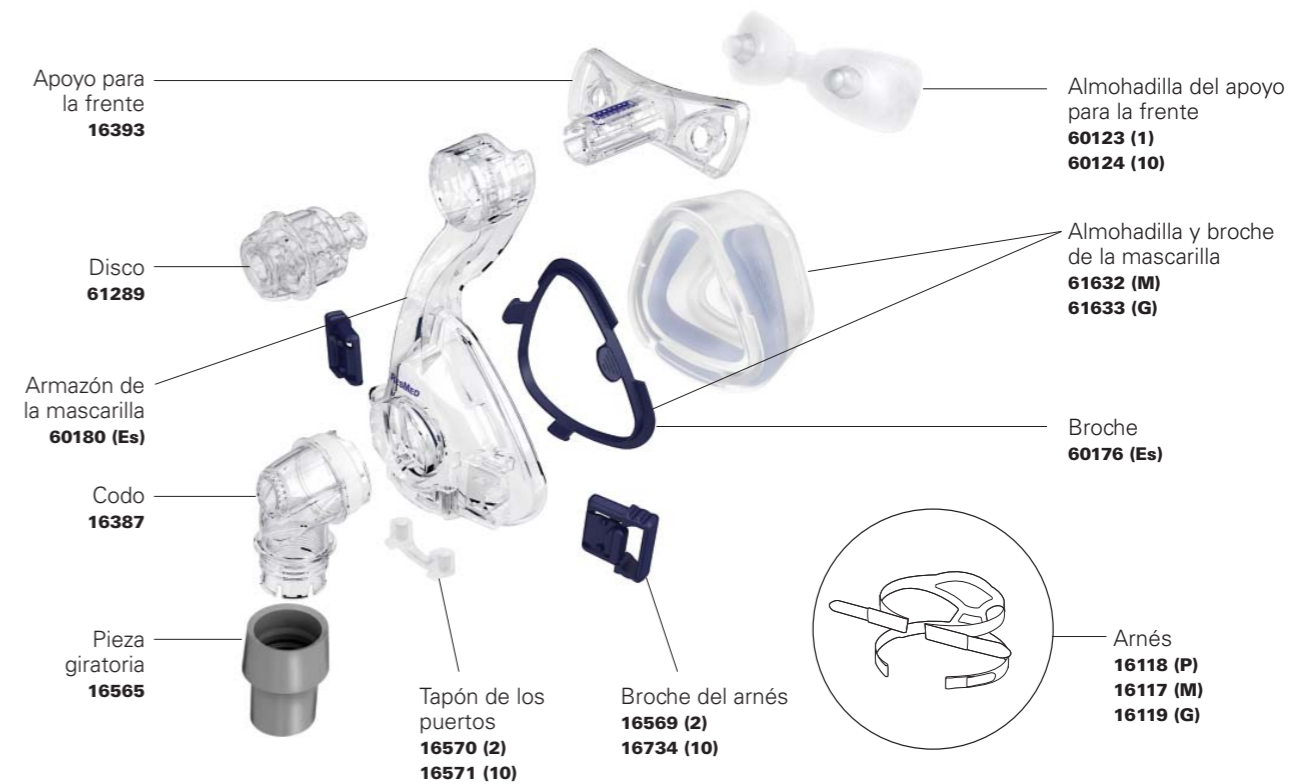

M Mediano

L Grande

Es Estándar

* contiene broches para el arnés



Para obtener más información, consulte el manual del usuario de la mascarilla nasal Mirage SoftGel.

¹ Estudio de mercado de ResMed relativo a las mascarillas de gel.