


# Guia de medida

## Instruções:

- 1 Imprima este Ficheiro PDF em Adobe a 100% na sua impressora. Utilize a verificação da exatidão da impressão à sua direita para assegurar que imprime com o tamanho adequado.
- 2 Dobre a parte inferior desta página pela linha tracejada.
- 3 Corte ao longo da linha tracejada em torno do medidor da máscara.
- 4 Coloque o medidor da máscara no seu nariz, conforme demonstrado na imagem em baixo.
- 5 Determine o tamanho adequado verificando a área que a extremidade do seu nariz alcança. (S – Pequeno, M – Médio ou L - Grande)

A Philips Respironics recomenda que consulte sempre um Especialista do sono sobre a colocação de uma máscara para assegurar um tamanho e ajuste adequados.

## Amara View

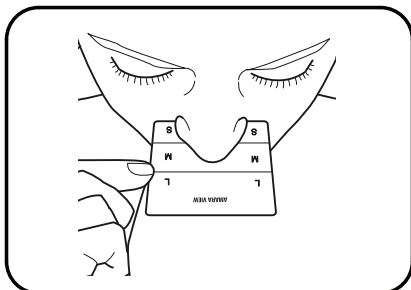

**DOBRE** ao longo da linha tracejada

## Verificação da exatidão da impressão



## Medidor da máscara

**CORTE** ao longo da linha tracejada

